

① 安心レベル バロメーター



	バロメーター				
レベル	レッド	オレンジ	イエロー	ライトグリーン	グリーン
抗体価	0~1.60	1.61~4.15	4.16~13.72	13.73~36.89	36.90~
説明	コロナウイルスに対する抗体を検出できませんでした。	コロナウイルスに対する中和抗体がないか極めて少ないと思われる水準です。	コロナウイルスに対する抗体が比較的少ないと思われる水準です。	コロナウイルスに対する抗体が平均的な水準にあると思われます。	コロナウイルスに対する抗体が高い水準であるといえます。
対応	嚴重な感染予防対策を実施しましょう。感染リスクの高い場所を避けましょう。医療機関での検査もご検討ください。	嚴重な感染予防対策をしましょう。感染リスクの高い場所を避けましょう。	十分な感染対策をしましょう。感染リスクの高い場所を避けましょう。	十分な感染対策をしましょう。高齢者等は、感染リスクの高い場所を避けましょう。	高い抗体価でも感染する可能性があります。しっかりした感染対策を怠らないようにしましょう。
コロナウイルスに対する抗体	-	+	++	+++	++++
中和抗体	-	-	+	++	+++

※上記バロメーターは、当社統計データや学術文献によって、当社が独自に作成した目安です。

※抗体価が高い場合でも、感染するリスクがあります。新型変異株の発生、ウイルスの量や飛瀑時間などによっては感染することが知られています。厚生労働省のガイドラインに沿った感染対策を十分に行ってください。

※コロナウイルスに対する抗体は、ワクチンや感染によって様々なタイプの抗体ができますが、中和抗体はコロナウイルスに感染すること防ぐ抗体です。

